



Kuvings Body Fat Analyzer Manual de Instrucciones



GB

Para seguridad y uso correcto, por favor lea este manual de instrucciones antes de usar el producto.

Instrucciones del Producto

El Kuvings Fat Analyzer (Medidor de masa corporal), es un dispositivo portable que se conecta a la aplicación **Kuvings Smart Juicer Global** para proporcionar resultados de medición de la composición corporal e información de salud.

Mide la impedancia bioelectrónica a través de cuatro electrodos en el dispositivo y proporciona los resultados de la medición de 7 tipos de composiciones del cuerpo (masa de grasa corporal, porcentaje de grasa corporal, masa muscular, contenido de agua corporal, BMI, tasa de metabolismo básico y masa mineral)

Adicional, te recomendará recetas de jugos y bebidas personalizadas de acuerdo a los resultados de estas mediciones.

Este producto se utiliza conectándose por Bluetooth a través de un dispositivo móvil. (iOS 9.0 o posterior / Android 05 4.3.3 o posterior)



Qué Incluye



Dispositivo



Batería




Manual de uso

App


Por favor descarga la aplicación "Kuvings Smart Juicer Global" de la tienda de aplicaciones Google Play Store o Apple App Store.



Descripción del Dispositivo

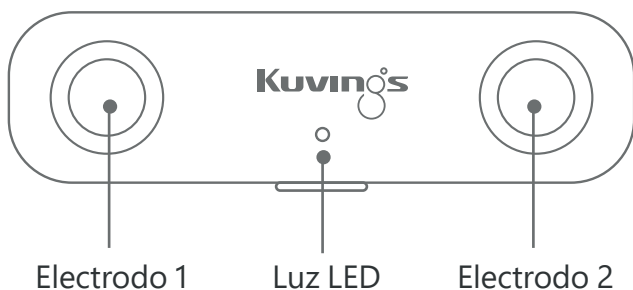


<Frente>

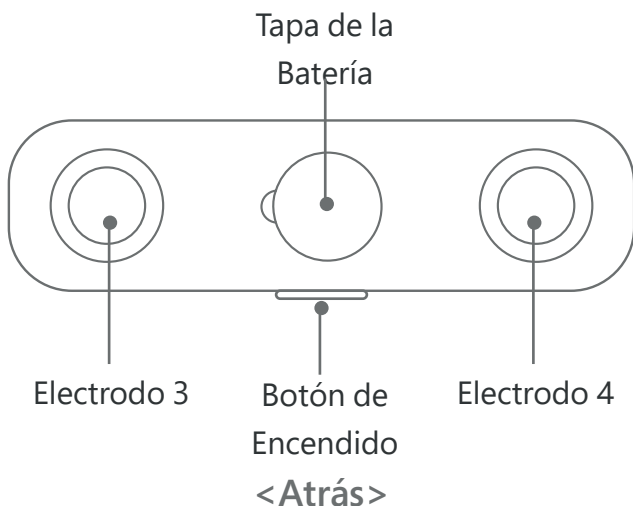

<Atrás>

Instrucciones de Uso

1. En la parte trasera del dispositivo abra la tapa como se muestra en el diagrama e inserte la batería suministrada.

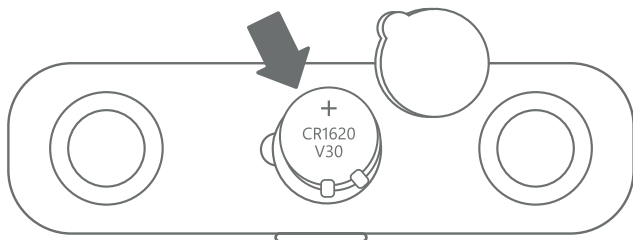

Asegúrese de usar una batería de botón tipo CR1620 (3.0V =)

Tenga cuidado de no cambiar la polaridad cuando cambie la batería.

Tenga cuidado de no dañar sus uñas al abrir la tapa de la batería. (Por favor compre y use la batería, ya que debido a las regulaciones ésta podría no estar incluida).

2. Por favor descarga la aplicación de Kuvings Smart Juicer Global en la App Store o Google Play. Una vez instalado por favor abra la app y cree su Perfil de Usuario. (Nombre, género, fecha de nacimiento altura y peso). Ingrese el número de serie que se encuentra en la parte posterior del dispositivo y regístrese como comprador.


3. Presiona el botón de encendido de uno de los lados del dispositivo, compruebe que el LED blanco este encendido y que el dispositivo esté operando.

Instrucciones de Uso

4. Abre tu aplicación de **Kuvings Smart Juicer Global** en tu móvil y selecciona "Mide tu", después de ingresar la información de usuario por favor ve al siguiente paso.


*Cualquiera que puede medir su composición corporal como invitado, sin embargo estas medidas no se guardarán.

5. Selecciona el dispositivo "HealthFriend" y vincúlalo con tu móvil.

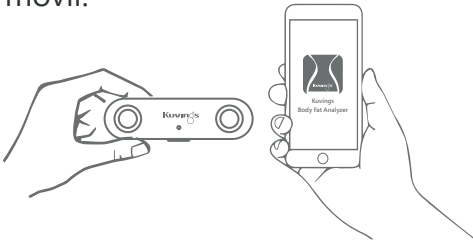

6. Sosten los 4 electrodos con precisión con tus pulgares y con el dedo índice justo como se muestra en el diagrama de abajo. Para medidas más precisas estirá los brazos hacia enfrente y evita moverte o hablar mientras la medición está curso.


* Por favor lava tus manos antes de tomar tus medidas ya que se puede producir un error al momento de tomar las medidas con las manos secas, hinchadas, lastimadas, con callos o sucias.

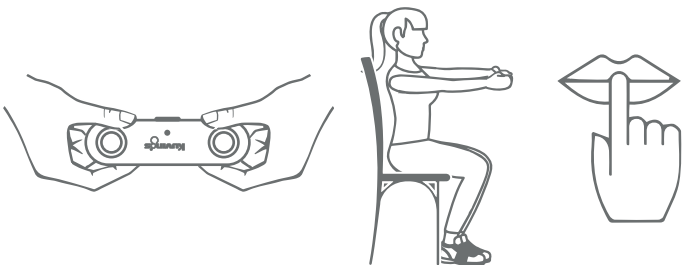

Instrucciones de Uso

7. Después de llenar tus datos en la aplicación, se mostrará un display con tus resultados y las recetas de jugos recomendados.

8. La aplicación te mostrará la medida de tus resultados, la descripción de cada uno de ellos y la recomendación de recetas de jugos.

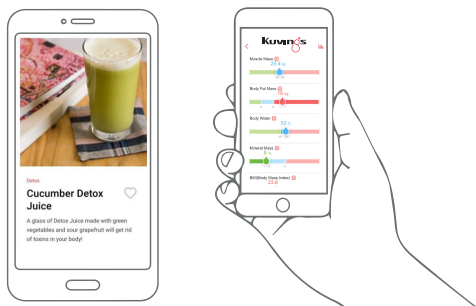

Tips para Resultados Precisos

- Por favor manténgase de pie por 5 minutos antes de medirse y después vuelva a tomar asiento para tomar sus medidas.
- Si es posible, por favor midase con el estomago vacío y al menos con 2 horas antes de comer para incrementar la precisión de las medidas.
- Trate de medirse en una habitación con una temperatura (20° a 25° C°) y en una hora establecida del día para evitar afectar el metabolismo en el cuerpo.
- Por favor use el baño antes de tomar sus medidas. Por favor no tome sus medidas después de ejercitarse, hacer activación física o ir a un sauna.

*Por favor lleva un registro y toma nota de las mediciones que te da aplicación.

Exclusiones de Uso



ANTES DE USAR REVISE

1. Este dispositivo puede afectar a aquellos con marcapasos o aparatos medicos relacionados con el ECG, corazones artificiales, y otros dispositivos médicos. Por favor no use este producto si usa alguno de esos dispositivos.
2. Por favor no use este dispositivo si está embarazada o sospecha que esta embarazada o durante su período.
- 3.No usar este dispositivo para aquellas personas que no están bien física o mentalmente.
4. Este dispositivo no se debe usar por otros propósitos más que el específico.
5. No deberás desamblar o modificar este dispositivo si no se perderá la garantía.



Notas de Uso


- Mantén el dispositivo fuera del alcance de los niños y asegurate de que nadie pueda meterse la batería en la boca ya que pueden correr el riesgo de que sea tragada.
- Consulta a un experto de la salud primero si vas a considerar el iniciar un programa de ejercicio/dieta con el propósito de perder peso.
- No utilices el dispositivo de medición, cerca de un dispositivo que genere o use altas ondas electromagnéticas, como lo es un horno de microondas ya que puede dar resultados incorrectos.
- No tomes tus medidas en ambientes secos o bajo condiciones en las que se puede generar estática en la ropa.
- Este producto puede usarse en teléfonos móviles (iOS 9.0 o una versión anterior/ Android_05 4.3.3 o una versión anterior)



Este no es un dispositivo médico, y no puede diagnosticar enfermedades. Por favor consulta a tu doctor o algún otro experto en la salud calificado, para cualquier pregunta si tienes alguna condición médica, procedimiento o tratamiento.

Limpieza y Mantenimiento

- Por favor ten cuidado con cualquier sustancia extraña al momento de tocar los electrodos del dispositivo de medición.
- Si cualquier sustancia o suciedad se presenta en el dispositivo, remuevelo con un trapo suave o con una pequeña cantidad de agua y jabón antes de usar el dispositivo.
- Almacena tu dispositivo en un lugar libre de estática eléctrica.

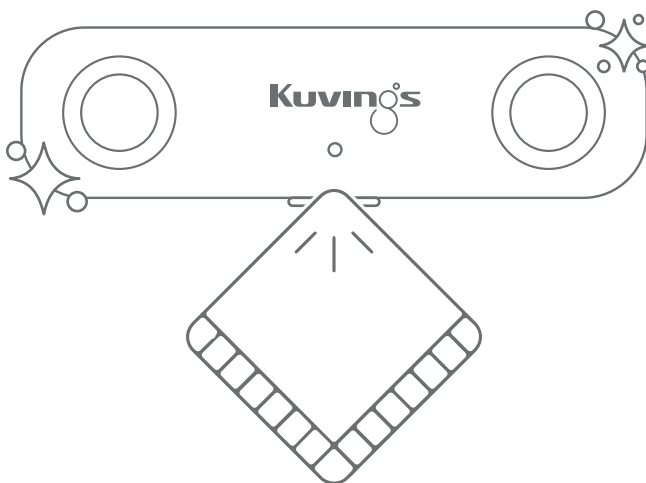

Kuvings®
MÉXICO

www.kuvingsmexico.com.mx

 **HLW**
Healthy Living Wares

Tel. 55 5379 1000

Whatsapp: 55 4323 0820

Mail: contacto@hlw.com.mx